



<b>NOME DEL PRODOTTO</b>	MASCHERINA MRZ 3VELI
<b>CODICE</b>	MRZ3VELI
<b>BANCA DATI NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO CON IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE</b>	Codice: 1971810 Inserito in data 9 Luglio 2020
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	Mascherina protettiva monouso 3 strati - Con elastici e stringinaso - non sterile
<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Mascherina facciale ad uso medico EN 14683 tipo II
<b>EFFICACIA FILTRAZIONE BATTERICA (BFE)</b>	Maggiore od Uguale 98%
<b>MONOUSO O MULTIUSO</b>	MONOUSO
<b>STERILITÀ</b>	NON STERILE
<b>NUMERO DI STRATI</b>	3
<b>DIMENSIONI</b>	175mm x 95mm
<b>MATERIALI</b>	La mascherina è realizzata attraverso l'accoppiamento di 3 strati : Strato interno (a contatto col volto): TNT Spunbond, Polipropilene 100% Bianco, (Q-TEX PP spunbonded nonwoven - 25g/m2 white, fornito da Q-Nonwovens BV) Strato centrale: TNT Meltblown, 100% polipropilene, 22 g/m2, 0,2 mm. Strato esterno: TNT Spunbond, Polipropilene 100% azzurro, (Q-TEX PP spunbonded nonwoven - 28g/m2 , fornito da Q-Nonwovens BV) Gli elastici sono in poliestere e elastame (87% e 13% rispettivamente) e sono forniti da EFFE-ELLE srl.
<b>IL DISPOSITIVO CONTIENE LATTICE?</b>	Il lattice non è un componente del dispositivo.
<b>POTERE DI FILTRAZIONE DEL DISPOSITIVO</b>	Mascherina TIPO II secondo ISO 14683.
<b>INDICARE SE LA MASCHERINA È CONFORME A NORME TECNICHE</b>	Conforme a ISO 14683 e alle parti applicabili della ISO 10993
<b>DESCRIVERE IL CONFEZIONAMENTO</b>	Scatola in cartoncino da 50 pezzi contenente 5 buste in PE da 10 pezzi ciascuna.
<b>MODO D'USO</b>	Indossare la mascherina, coprendo naso e bocca. Far passare gli elastici dietro le orecchie; regolare lo stringinaso per fissare la mascherina. Si consiglia di sostituire la mascherina ogni 4-8 ore di utilizzo. Non tenere la mascherina intorno al collo, nemmeno temporaneamente.
<b>PRECAUZIONI</b>	Le mascherine possono bloccare alcuni contaminanti ma non eliminano il rischio di malattia o infezione. L'uso scorretto della mascherina può esporre a rischi di infezione. Questo prodotto è monouso e non può essere lavato. Le mascherine usate possono essere contaminate. Rimuoverle toccando solo gli elastici e disinfettare le mani dopo la rimozione. Smaltire in modo appropriato.
<b>CODICE CND</b>	T020601 Mascherine Chirurgiche Standard
<b>CODICE EAN</b>	Confezione 10 pz 8057711720057 - Confezione 50 pz 8057711720040